

# SPLINT PADDING AND LINING MATERIALS ORFILASTIC

## A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ORFILASTIC est un matériau de doublure en éponge élastique recouvert d'une mousse auto-adhésive à cellules ouvertes.

Il est utilisé pour améliorer la transmission aérienne des orthèses, des dispositifs d'immobilisation externes et des aides à la réhabilitation, ainsi que pour améliorer le confort du port de ces produits.

## B. GAMME DE PRODUITS

N° d'art	Couleur	Largeur: 50 cm de large Longueur: 1 m Épaisseur: 3 mm
35111	skin	
35117	black	

## C. PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

- \* Coupez le motif avant de retirer le papier de protection de l'arrière (la direction n'a pas d'importance).
- \* ORFILASTIC est fixé à l'intérieur de l'orthèse, une fois l'orthèse a été formée.
- \* Retirez le papier de protection et collez ORFILASTIC sur la zone requise.
- \* Continuez retirer le papier tout en collant ORFILASTIC à l'orthèse sous légère pression. La pression doit éviter l'apparition de plis.
- \* Assurez-vous que ORFILASTIC ne reste pas dos à dos: c'est irrévocable.

## D. ENTRETIEN ET GESTION DES DÉCHETS

- \* ORFILASTIC N'EST PAS imperméable et doit être remplacé si nécessaire.
- \* Après utilisation, ORFILASTIC peut être éliminé avec les ordures ménagères sans nuire à l'environnement.

## E. INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour plus d'informations telles que les informations de contact des distributeurs, les brochures sur les produits, les fiches de données de sécurité et les informations réglementaires, visitez notre site web [www.orfit.com](http://www.orfit.com).

### Note:

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries..



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
[welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com)

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Ref. No. 31301FR  
VERSION 2  
LAST UPDATE: 25/05/2021  
REVISION DATE: 25/05/2023