

HOOK AND LOOP TAPE

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

HOOK and LOOP TAPE servent de sangle de fixation pour orthèses, dispositifs d'immobilisation externe et aides techniques.

B. GAMME DE PRODUITS

HOOK and LOOP TAPE sont disponible en différentes couleurs, largeurs, degrés d'étirement et combinaisons prédécoupées. Les numéros d'article sont mentionnés ci-dessous.

Couleur	Largeur	LOOP TAPE		HOOK TAPE		RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE	
		standard	auto-adhésif	standard	auto-adhésif	loop	hook
white	25 mm	35400L	35405L	35400H	35405H	35444L	35444H
beige	25 mm	35411L	35412L	35411H	35412H		
blue	25 mm	35401L			35406H		
black	25 mm	35404L			35409H		
fluo yellow	25 mm	35402L			35407H		
fluo pink	25 mm	35403L			35408H		
white	50 mm	35413L	35414L	35413H	35414H		
beige	50 mm	35415L	35416L	35415H	35416H		
black	50 mm	35441L			35442H		

ELASTIC LOOP TAPE		
Couleur	Largeur	FAIBLE ÉTIREMENT
white	25 mm	35437L
beige	25 mm	35439L
black	25 mm	35432L
white	50 mm	35438L
beige	50 mm	35440L
black	50 mm	35443L

LOOP TAPE (uniquement en couleur Beige)		
Longueur	Largeur	SANGLE D'ATTELLE
25 cm	25 mm	35450
40 cm	25 mm	35455
50 cm	25 mm	35460

C. PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

En règle générale, HOOK TAPE est fixé sur l'orthèse et LOOP TAPE est utilisé comme sangle de fermeture. Vous trouverez ci-après des exemples des techniques d'application les plus courantes:

1. Fixez le ruban adhésif auto-adhésif sur les deux côtés de l'attelle, les ponts du LOOP TAPE.
2. Le LOOP TAPE est collé sur le matériau d'un côté de l'attelle par chauffage à sec avec un pistolet thermique (réf. 35351), le ruban auto-adhésif est collé du côté opposé.
3. Le LOOP TAPE est attaché à l'attelle de telle sorte que l'arrière soit en contact avec la peau et revienne par un passant afin d'être fixé au HOOK TAPE.
4. La «sangle d'attelle» sert à fixer une orthèse circulaire autour du membre. Le HOOK TAPE auto-adhésif est généralement fixé au bas d'une attelle palmaire.

Note:

Utilisez la largeur appropriée en fonction des forces à appliquer. La bande élastique est préférable lorsque la pression est appliquée sur les protubérances osseuses.

D. ENTRETIEN ET GESTION DES DÉCHETS

HOOK et LOOP TAPE sont des produits en nylon et peuvent être nettoyés avec l'orthèse à l'eau tiède. Bien rincer.

Les produits autocollants doivent être protégés de la poussière, de la lumière et de l'humidité à une température maximale de 25°C (77°F).

A. CONSEIL POUR LE PATIENT

Donner des directives distinctes sur l'insertion et la direction des sangles de fixation, ainsi que sur la tension souhaitée. Une fixation étroite peut entraver la circulation sanguine et entraîner une nécrose des tissus.

B. INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour plus d'informations telles que les informations de contact des distributeurs, les brochures sur les produits, les fiches de données de sécurité et les informations réglementaires, visitez notre site web www.orfit.com

Note:

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries..



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com



Ref. No. 31400FR
VERSION 3
LAST UPDATE: 26/01/2023
REVISION DATE: 26/01/2025