

Reinigung und Desinfektion von Orfit-Masken und Hardware

Hygienemaßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Patienten und Personal

Mit dem neuartigen Corona-Virus ist eine ausgezeichnete Hygiene wichtiger denn je geworden. Wir von Orfit möchten Ihnen dabei helfen und Sie über die besten Möglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion der Orfit-Masken und -Hardware in Ihrer Einrichtung informieren. In dieser Zeit sollte man ganz besonders auf die Hygiene achten, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, sowohl im Interesse der Patienten wie auch des Personals.

Deshalb...

Halten Sie Masken und Hardware sauber und desinfiziert!

Alle Orfit-Masken und -Hardware (Kissen, Basisplatten, Kopfstützen...) können mit Desinfektionsmitteln auf Isopropanol- und Ethanolbasis mit einem weichen Tuch aufgetragen, gereinigt und desinfiziert werden.



WICHTIG: nach der Desinfektion sollten alle behandelten Teile trocken sein !

Achten Sie darauf, verschmutzte Orfit-Masken regelmäßig zu reinigen! Dabei wird eine Schicht mit abgestorbenen Bakterien, die sich auf der Maske gebildet haben könnte, entfernt und Sie erhalten dadurch eine frische Oberfläche mit erneuter antibakterieller Wirkung.

Ungeeignete Produkte zur Reinigung und Desinfektion von Orfit-Materialien:

Verwenden Sie keine Aerosolsprays, ätzenden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel! Vermeiden Sie Produkte mit Bleichmitteln, da diese Masken verfärben und die Beschichtung von Kopfstützen und Kissen beschädigen können!



Wenn Sie sich unsicher über Ihre Reinigungslösung sind, verwenden Sie diese bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir überprüfen für Sie, ob Ihre Reinigungslösung geeignet und sicher in der Anwendung ist und informieren Sie.